


Kurzanleitung für den Selbsttest

Produkt: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Hersteller: Roche

Vorbereitung

Diese Komponenten sollten zur Testdurchführung vorliegen:

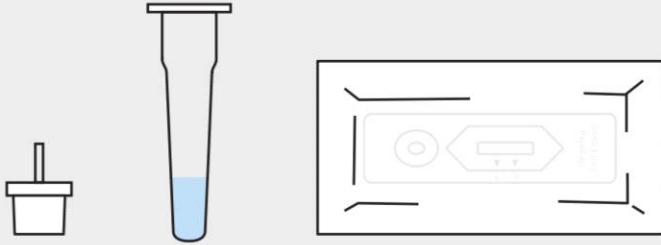


Zur Probennahme den separat erhaltenen Nasen-Abstrichtupfer verwenden.




Probennahme (bei Zimmertemperatur)

- 1 Kopf leicht nach hinten neigen, Nasen-Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher langsam ca. 2 cm parallel zum Gaumen einführen, dabei keinen Druck ausüben. Jeweils viermal drehen und dabei über die Nasenschleimhaut führen (ca. 15 Sekunden)

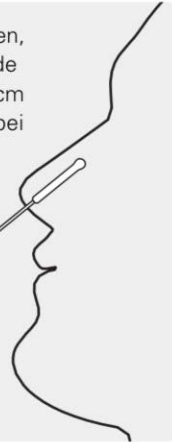

Behandlung der Probe

Nasen-Abstrichtupfer einführen und mehr als zehnmals drehen

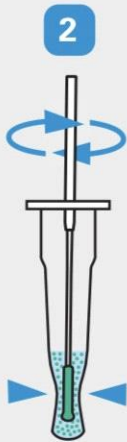

mehr als **10x**

Röhrchen dabei gegen Nasen-Abstrichtupfer zusammendrücken, um Antigene zu lösen

Nasen-Abstrichtupfer unter festem Druck auf die Röhrchenwand entnehmen und Tropfkappe aufsetzen



Vier Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben




Ergebnis nach **15 min** ablesen




Nach mehr als 30 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!

Auswertung der Ergebnisse

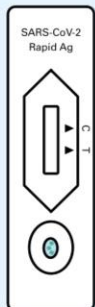


Jede Farbschattierung bei der Testlinie (T) ist als positiv zu betrachten

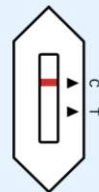


Negativ

Farbige Kontrolllinie (C)

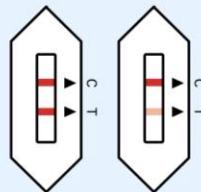

Positiv

Farbige Kontroll- (C) und Testlinie (T)

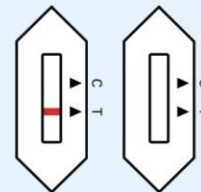

Ungültig/Unklar

Keine Kontrolllinie (C)



Verwendete Testkits gut verpackt im Hausmüll entsorgen

Schüler/-innen können in der Schule bleiben

Schüler/-innen werden isoliert und von der Schule abgeholt bzw. nach Hause geschickt; eine Kontaktaufnahme mit dem örtlichen Gesundheitsamt sowie eine PCR-Nachtestung sind erforderlich

Test mit neuem Material wiederholen